


Обтурационная система  
Термоплаггер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**C-Fill**  
pack


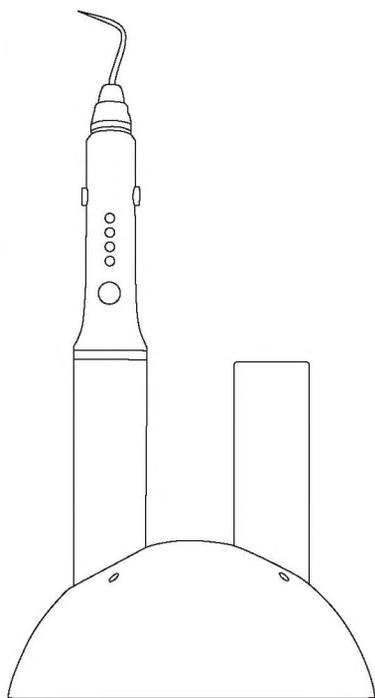




## Конструкция и установка

Устройство состоит из насадки, термоплаггера, аккумулятора, зарядной базы и адаптера.

### Установка насадки и аккумулятора

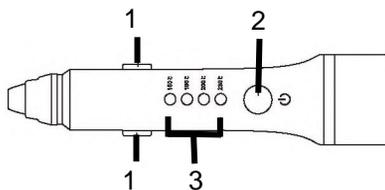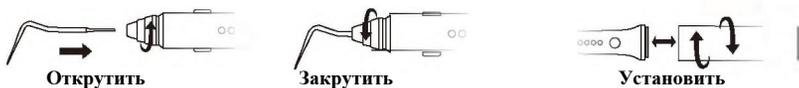

**1 - нагревание 2 - питание 3 - индикаторы температуры**

1. "2" 2-
2. "2"  
(180°C, 200°C, 230°C, 300°C).

**230 °C.**


3. Удерживайте одну или обе кнопки нагрева "1", чтобы нагреть насадку; одновременно с нажатием раздастся звуковой сигнал. Чтобы остановить нагрев, отпустите кнопки нагрева "1"; снова прозвучит сигнал. Для достижения рабочей температуры устройству необходимо всего 3 секунды.

## Информация об эксплуатации

1. Если нагревание продолжается более 30 секунд, устройство автоматически прекратит работу и перейдет в безопасный режим во избежание перегрева. Чтобы продолжить нагрев, отпустите и нажмите кнопку нагрева еще раз.
2. В целях экономии электроэнергии устройство выключится через 2 минуты бездействия.

## Зарядка


1.

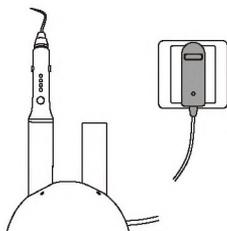


2. Зарядная база позволяет заряжать два аккумулятора одновременно. При подключении к источнику питания на адаптере загорается светодиодный индикатор.
3. Когда аккумулятор заряжается, индикаторы на зарядной базе горят желтым светом. Когда аккумулятор заряжен, индикаторы становятся зелеными и система автоматически прекращает зарядку.
4. Для полной зарядки аккумулятора требуется не менее 4,5 часов.

## Клиническое использование

### 1. Подготовка: гуттаперчевый штифт

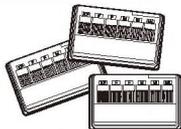

### 3. :

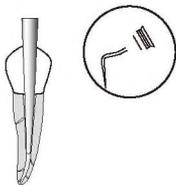

### 5.



Подберите подходящий к корневому каналу гуттаперчевый штифт


### 7. Вставьте гуттаперчевый штифт




Нанесите силер на штифт и вставьте его в корневой канал

### 2. Подготовка: ручной плаггер


Подготовьте 2-3 плаггера для уплотнения гуттаперчи. Отметьте длину корневого канала с помощью резинового стоппера.

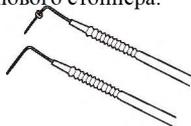

### 4.

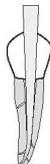

### 6. Отметьте длину насадки

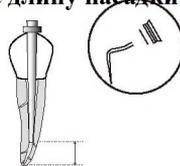


Подберите подходящую насадку и плаггер. Длина насадки должна быть на 4-6 мм меньше рабочей длины. Отметьте длину насадки с помощью резинового стоппера.

### 8. Удалите излишки гуттаперчи




Срежьте лишнюю гуттаперчу при помощи насадки

## 9. Нагревание и введение

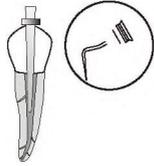


Нагрейте и введите насадку с гуттаперчей в корневой канал. Глубина введения должна быть на 4-6 мм меньше рабочей длины.

## 11. Извлеките насадку

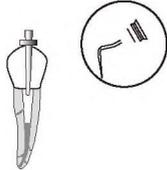


Во избежание налипания гуттаперчи нагревайте насадку в течение 1-2 секунд перед извлечением.

## 10. Уплотнение

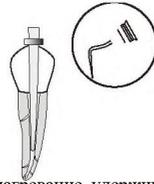

Прекратите нагревание, удерживая насадку в корневом канале в течение 10 секунд.

## 12.

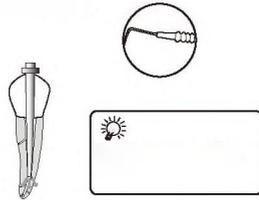

1.

2.



15-



- : -10°C +55°C  
 - : 10%RH-85%RH  
 - : 86 -106

121°C



- 6

1



: 100-240 / 50-60  
 : DC 5 , 1,5  
 : DC 3.7 / 2800  
 : 0°C 45°C  
 : 10%RH-85%RH  
 : 50%RH-106%RH



II ( )



" "



! ,



,



,